






## CE QU'IL FAUT RETENIR :

-  Quasi invisibles et amovibles
-  Gouttières à porter en continu (entre 20 et 22 heures/jour)
-  Durée du traitement : de 6 à 18 mois environ
-  Pour pré-adultes et adultes
-  Produit 100% Français

## LE TRAITEMENT EN 4 ETAPES



- 1. 1<sup>ère</sup> consultation**  
Le chirurgien-dentiste réalise un examen initial et prend une empreinte de votre dentition.
- 2. 2<sup>ème</sup> consultation**  
Un plan de traitement détaillé vous est proposé (nombre de gouttières nécessaires, durée et coût du traitement). Après validation de votre part, vos gouttières sont fabriquées sur-mesure.
- 3. Début du traitement**  
Portées quotidiennement entre 20 et 22 heures par jour, les gouttières transparentes DentoSmile vont déplacer vos dents progressivement. Gouttières à changer environ toutes les deux à trois semaines.
- 4. Fin du traitement**  
Après 6 à 18 mois de traitement, retrouvez un alignement parfait.



BIOTECH DENTAL

CACHET DU PRATICIEN

WWW.DENTOSMILE.FR

DISTRIBUÉ PAR :  DENTOSMILE  
BIOTECH DENTAL

235 Rue des Canesteu - ZI la Gandonne  
13300 Salon de Provence - FRANCE  
Tél. +33 (0)4 13 22 82 40  
info@dentosmile.fr

Fabricant : Poly-Shape. Les gouttières transparentes DentoSmile sont des appareils orthodontiques amovibles, destinés à corriger des défauts mineurs de la dentition. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette réglementation le marquage CE. Demander conseil à votre praticien. Lire attentivement les instructions dans la notice. PHOTOS NON CONTRACTUELLES. Ne pas jeter sur la voie publique.  
Imprimerie Vallière - 163, Avenue des Molières - ZAC des Molières - 13140 MIRAMAS

BIOTECH DENTAL  
DENTOSMILE ALIGNERS



GOUTTIÈRES  
TRANSPARENTES




BIOTECH DENTAL

## GOUTTIÈRES TRANSPARENTES DENTOSMILE


## AVANTAGES PRODUIT

Système de gouttières transparentes sur-mesure, DentoSmile permet de corriger les malpositions dentaires par l'application de forces particulièrement faibles.

Portées quotidiennement sur des périodes d'environ deux à trois semaines, les gouttières vont déplacer les dents progressivement et en douceur. A la fin de chaque période, les gouttières doivent être remplacées par des nouvelles.

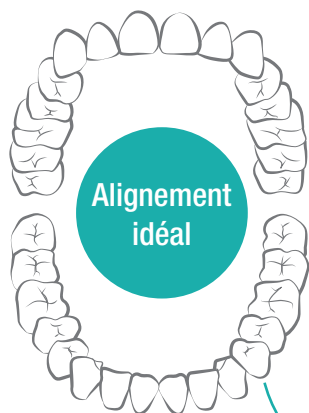

### LES GOUTTIÈRES TRANSPARENTES SONT PRECONISÉES EN CAS DE :

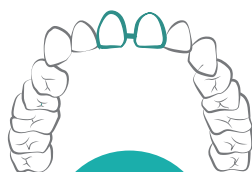

1. **Gouttières sur-mesure**

2. **Pas de limite d'âge**

3. **Confortable**

Absence de bagues et de fils métalliques

4. **Amovible**


Retrait sans contrainte

5. **Hygiène dentaire**

Facilité de brossage

6. **Quasi invisible**

Discrétion

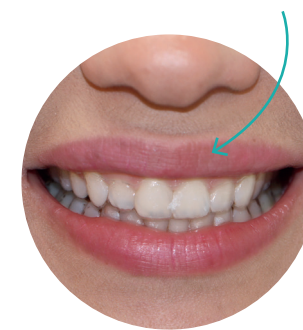

Gouttières en bouche

Ce protocole d'alignement invisible peut être pratiqué par votre chirurgien-dentiste et ne nécessite pas de consultation chez un orthodontiste (contrairement au traitement traditionnel d'alignement, avec bagues et fils).